

**PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS**

**VINIL SEM AMIDO**



**CÓDIGO:** 10.81.077.11

**COR:** Transparente

**TAMANHOS:** 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)  
CA 48.748 apenas tamanhos P, M e G

**COMPOSIÇÃO:** Vinil

**CA: 20.722 VALIDADE DO CA: 22/10/2026**  
**CA: 45.756 VALIDADE DO CA: 26/04/2026**  
**CA: 48.748 VALIDADE DO CA: 14/05/2028**  
**CA: 41.546 VALIDADE DO CA: 23/12/2027**

**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação

**DESCARTÁVEL**

**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa.

**INDICADA PARA**

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como a fabricação, manipulação, seleção e também no processo de embalagem de chocolates, bolos, bombons e similares, com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas. Tintura e relaxamento capilar, estética, limpeza e manutenção e outros.

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**

ISO 374:2019 - Riscos Químicos		CA: 20.722	CA: 45.756	CA: 48.748	CA: 41.546
Produto Químico	Classe	Nível	Nível	Nível	Nível
Hidróxido de Sódio 40 %	K	6	6	6	6
Hidróxido de Amônio	O	3	2	3	3
Peróxido de Hidrogênio	P	6	6	5	6
Formaldeído 37%	T	6	5	5	6



**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
6 (EP)	7898207212707	17898207212704
7 (P)	7898207210581	17898207210588
8 (M)	7898207210598	17898207210595
9 (G)	7898207210604	17898207210601
10 (EG)	7898207213476	17898207213473

**INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Destruir após o uso;

Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e químicos puros; A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura; É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação; Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas; Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

## DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



**Telefone: (41) 2105-0055**

**sac@volkdo brasil.com.br**

**www.volkdo brasil.com.br**

*Atualizado em Fevereiro 2024*